

# 最終更新日:2019年2月14日

<u>LD-SKAIP の利用登録前</u> <u>LD-SKAIP の利用登録申込~仮利用</u> <u>LD-SKAIP の本利用</u>

操作マニュアル-1- → 操作1 操作マニュアル-2- → 操作2 操作マニュアル-3- → 操作3 操作マニュアル-抜粋版- → 操作抜粋 (各マニュアルのページ数は2019年1月16日更新版を参照)

■基本的な iPad の操作方法は説明していない。Apple 社の公式サイトやインターネットの 検索エンジンで検索して確認する。 LD-SKAIP の利用登録前

- <u>LD-SKAIP の適用範囲を教えてほしい</u>
- <u>LD-SKAIP を中学生にも検査実施できるか</u>
- <u>LD-SKAIP のステップ I は誰でも利用できるのか</u>
- ・LD-SKAIPのステップII・IIはどうしたら利用できるのか
- <u>LD-SKAIP を利用するにはなにが必要になるのか</u>
- iPad のモデルはなにがよいか
- <u>iPad の Wi-Fi モデルと Wi-Fi+Cellular モデルはなにが違うのか</u>
- ・
   <u>検査をするのに、なにが必要になるのか</u>
- ・ <u>日本 LD 学会/特別支援教育士資格認定協会マイページの「LD-SKAIP 利用」をクリックし</u>
   <u>ても、LD-SKAIP 利用者管理システムに入れない</u>
- ・<u>マイページ(LD-SKAIP 利用者管理システム)の「利用登録/講習会申込」をクリックし</u> ても、次の画面に進めない
- ・<u>LD-SKAIP のアプリダウンロード先がわからない</u>
- <u>アプリはステップⅠ、Ⅱ、Ⅲすべてダウンロードしなければいけないのか</u>

LD-SKAIP の利用登録申込~仮利用

- <u>LD-SKAIPの適用範囲を教えてほしい</u>
- <u>LD-SKAIP を中学生にも検査実施できるか</u>
- ・<u>LD-SKAIP のアプリダウンロード先がわからない</u>
- <u>アプリはステップⅠ、Ⅱ、Ⅲすべてダウンロードしなければいけないのか</u>
- <u>アプリにログインできない</u>
- ・講習会の受講を申し込み、費用を納入したのにステップⅡ(・Ⅲ)が起動しない・クラウ
   ドシステムにログインできない
- クラウドシステムにログインできない
- ・ インターネットには常に接続している必要があるか
- クラウドシステムのログインページが分からない
- LD-SKAIP 利用者管理システムのログインページが分からない
- ・<u>パスワードを忘れてしまった</u>
- ・<u>LD-SKAIP ID を忘れてしまった</u>
- 操作マニュアルをダウンロードしたい
- ・回答用紙・記録用紙をダウンロードしたい
- ・<u>これまでとは別の(新しく購入した)iPad で LD-SKAIP のアプリを使いたいがどんな手続</u> きが必要か

LD-SKAIP の本利用

- LD-SKAIPの適用範囲を教えてほしい
- <u>LD-SKAIP を中学生にも検査実施できるか</u>
- アプリにログインできない
- ・<u>講習会の受講を申し込み、費用を納入したのにステップⅡ(・Ⅲ)が起動しない・クラウ</u>

<u>ドシステムにログインできない</u>

- クラウドシステムのログインページが分からない
- LD-SKAIP 利用者管理システムのログインページが分からない
- ・<u>パスワードを忘れてしまった</u>
- ・<u>LD-SKAIP ID を忘れてしまった</u>
- 操作マニュアルをダウンロードしたい
- ・<u>回答用紙・記録用紙をダウンロードしたい</u>
- ・<u>これまでとは別の(新しく購入した)iPad で LD-SKAIP のアプリを使いたいがどんな手続</u> きが必要か
- <u>LD-SKAIP ステップII講習会、ステップII講習会を受講した者が S. E. N. S の会支部会で伝</u> 達講習会を行ってもよいか
- <u>ステップI、ステップII、ステップIIをそれぞれ別の日に行ってもよいか</u>
- 検査を中断したい時はどうすればよいか
- ・<u>ステップⅡ読字・書字・計算を中断し、そこまでの所見を確認したい時はどうすればよい</u>か
- ・<u>ステップⅡ読字・書字・計算を途中から実施し、実施分の所見を確認したい時はどうすれ</u> ばよいか
- ・検査実施後すぐに採点・同期しないといけないのか
- ・検査実施後すぐ別の検査を実施したり、別の児童に検査を実施してもいいのか
- アプリを終了するとログアウトしてしまうのか
- <u>ログアウトは必ずしないといけないのか/ログインしたままでもよいか</u>
- <u>ヘッドフォンから音が聞こえない</u>
- <u>ヘッドフォンをつけるのを嫌がる</u>
- ・<u>ステップⅢ算数で画面のメモに文字を書くのが難しい</u>
- ・iPadの電源が途中で切れてしまった・アプリが途中で落ちてしまった
- ・<u>アプリが固まってしまった</u>
- ・同じ児童に再度検査を実施したい
- ・<u>どれくらいあけたら同じ検査を再度検査してよいか</u>
- ・<u>年度が変わったが同じ識別名で検査してよいか</u>
- ・ <u>年度が変わったが、ステップIは新しい担任につけてもらった方がよいか、前の担任につ</u>
   けてもらった方がよいか
- ・検査を実施したのに、所見が見られない
- ・
   音声データ(ステップⅡ補助検査:音韻、ステップⅢ読み)を聞くことができない
- ・採点をしたのに「採点」のボタンが表示されたままになる
- ・<u>クラウドシステムに結果データを同期(送信・受信)できない</u>
- クラウドシステムで検査結果の閲覧・ダウンロードができない
- <u>結果を印刷したい</u>
- ・<br />
  結果を保護者に説明する際、結果データをそのままお渡ししてもよいか
- ・<u>クラウドシステムでステップⅢ算数の回答内容が表示されない</u>
- ・検査データを同期したのに、「結果受信」のボタンが表示されない

- ・<u>iOSのバージョンはどこで確認するのか</u>
- ・<u>i0S のアップデートとは何か</u>
- ・LD-SKAIP アプリのバージョンアップはしないといけないのか

#### ■LD-SKAIP の適用範囲を教えてほしい

LD-SKAIP は小学1年生~6年生を対象とした検査である。

#### ■LD-SKAIP を中学生にも検査実施できるか

LD-SKAIP は小学1年生~6年生を対象とした検査であり、標準化のデータは小学1年生~6 年生を対象にしている。そのため、中学生を検査した場合、小学6年生(12歳6か月以上)の 基準値によって評価される。

評価の判定がBやC、支援の必要性があると示された場合は、その能力が弱いと判断でき、その他の検査や日常の学習の様子を踏まえて支援・指導を行っていく。

評価の判定がA、今のところ支援の必要性はないと示された場合は、小学6年生の基準では問題がない、ということであり、生徒の実際の学年、年齢で問題が本当にないかどうかはわからない。そのため、その他の検査や日常の学習の様子を踏まえてさらに検討を行う必要がある。

以上を踏まえ、検査者の判断で LD-SKAIP を実施する。

この際、生年月日は生徒自身の生年月日を登録し、学年は6年と登録して実施する。

#### ■LD-SKAIP のステップ I は誰でも利用できるのか

2018年9月27日現在はLD学会会員が利用できる。

2018年度中にLD学会会員以外でも利用できるようになる予定である。

## ■LD-SKAIP のステップII・IIはどうしたら利用できるのか

ステップⅡとステップⅢは利用登録とステップⅡ講習会の受講、ステップⅢ講習会の受講をす ることで利用できる。

2018 年度の各講習会の受講対象は S. E. N. S および S. E. N. S-SV 有資格者のみである。有資格者 以外を対象とした講習会は今後開催予定である。

講習会については特別支援教育士資格認定協会のホームページおよびメールで案内する。

#### ■LD-SKAIP を利用するにはなにが必要になるのか

ステップ I を利用するには、iPad が必要である。

ステップⅡ、Ⅲを利用するには下記の機器、環境が必要である。

・iOS9以降の iPad

(9.7インチの iPad、iPad Pro、iPad Air または 10.5インチの iPad Pro
容量 16GB 以上、、Wi-Fi モデルまたはセルラー (Wi-Fi+Cellular) モデル)
\*iPad mini および 11インチ・12.9インチ iPad Pro は検査環境が異なるため推 奨しない

・マイク付きヘッドフォン

・iPad 対応のスタイラスペン(筆圧感知:なし・ありどちらでも可、

ペン先:シリコンゴム、導電性繊維、樹脂いずれも可

Apple Pencil は対応の iPad ならば可)

- ・パソコン (Windows7、Windows8、Windows10、Mac OS X 10.4以降)
- ・ブラウザソフトウェア (Internet Explorer、Firefox、Safari、Google Chrome、Microsoft Edge のいずれか)
- ・PDF 閲覧ソフト (<u>https://get.adobe.com/jp/reader/</u>から無料ダウンロード可)
- ・Wi-Fi 環境(アプリダウンロード、ユーザー登録、ログイン、クラウドへの結果送信時に必要。検査実施時にはWi-Fi 環境は不要である)

#### ■ iPad のモデルはなにがよいか

LD-SKAIP は標準化の際、画面サイズ 10.5 インチ、9.7 インチの iPad でデータを収集している。そのため、児童に検査を行う際は 10.5 インチ iPad Pro (10.5 インチ) または iPad (9.7 インチ)、iPad Air (9.7 インチ) を利用する。

11 インチ・12.9 インチ iPad Pro や iPad mini は検査環境が異なるため推奨しない。

# ■iPadのWi-FiモデルとWi-Fi+Cellularモデルはなにが違うのか

Wi-Fi モデルは Wi-Fi の環境で接続しているときのみインターネットにつなげることができる。

Wi-Fi+Cellular モデルでは Wi-Fi に接続していなくてもインターネットにつなげることができる。

LD-SKAIP の利用にはどちらのモデルでも可能である。

LD-SKAIP はアプリのダウンロードや検査結果の同期の際には Wi-Fi の環境が必要である。Wi-Fi 環境ではないモバイルネットワーク通信の状態では容量が大きいため、アプリのダウンロー ドや検査結果の同期を実施することはお勧めしない。

#### ■検査をするのに、なにが必要になるのか

ステップ Iの実施には、iPad が必要である。

ステップⅡ・Ⅲでは

・iOS 9 以降の iPad

(9.7インチの iPad、iPad Pro、iPad Air または 10.5インチの iPad Pro
容量 16GB 以上、、Wi-Fi モデルまたはセルラー (Wi-Fi+Cellular) モデル)
\*iPad mini および 11 インチ・12.9インチ iPad Pro は検査環境が異なるため推奨

しない

# ・マイク付きヘッドフォン (ステップⅡのみ)

・iPad 対応のスタイラスペン(筆圧感知:なし・ありどちらでも可、

ペン先:シリコンゴム、導電性繊維、樹脂いずれも可

Apple Pencil は対応の iPad ならば可)

が必要である。

# ■日本LD 学会/特別支援教育士資格認定協会マイページの「LD-SKAIP 利用」をクリックしても、LD-SKAIP 利用者管理システムに入れない

「ポップアップがブロックされました」というメッセージが出て、マイページ(LD-SKAIP利用者管理システム)に遷移しない場合は「このサイトのオプション」-「常に許可」をクリックし、今後ポップアップがブロックされないように設定を変更してから再度「LD-SKAIP利用」を クリックする。

日本の行ん行うなフレールディー おひとした おからした おからした おからした おう ひとう ひとう 日本 (A)				🛓 ページの先頭へ	
*.jald-sens.org からのパップアップがブロックされました。 - 医のみ許可(A) このサイトのオプション(0) ・ このかのなな	B	alar a Maadii dariin ah dalah dariin ah ah daan dada ah dariin ah ah dariin ah ah da			常に許可(A)。
	-	*.jald-sens.org からのボップアップがプロックされました。	一度のみ許可(A)	(このサイトのオプション(○)▼ )	consumer 2

ポップアップブロックの設定解除方法は下記から確認することができる https://jald-sens.org/entry/SettingPopup.pdf

# ■マイページ(LD-SKAIP 利用者管理システム)の「利用登録/講習会申込」をクリックしても、次の画面に進めない

「ポップアップがブロックされました」というメッセージが出て、次の画面に遷移しない場合 は「このサイトのオプション」-「常に許可」をクリックし、今後ポップアップがブロックされ ないように設定を変更してから再度「登録状況確認はこちら」をクリックする。

		ステップⅢ講習会			
-					常に許可(A)
	*.skaip.jp からのポップアップがブロックされました。	[	一度のみ許可(A)	このサイトのオプション(0) ▼	CONBORRED 2

ポップアップブロックの設定解除方法は下記から確認することができる <u>https://jald-sens.org/entry/SettingPopup.pdf</u>

## ■LD-SKAIPのアプリダウンロード先がわからない(操作1p.35、操作抜粋 p.35)

LD-SKAIP は iPad 用のアプリである。Android には対応していない。

各ステップのアプリは下記 QR コードを読み取ってダウンロードページにアクセスし「入手」-「インストール」をタップし、指示に従ってダウンロードする。







LD-SKAIP ステップ I

LD-SKAIP ステップⅡ

LD-SKAIP ステップⅢ

それぞれの URL は下記のとおりである。

ステップ I

<u>https://itunes.apple.com/us/app/スカイプ-ステップ/id1373157750?l=ja&ls=1&mt=8</u> ステップII

<u>https://itunes.apple.com/us/app/スカイプ-ステップ/id1375372760?l=ja&ls=1&mt=8</u> ステップⅢ

https://itunes.apple.com/us/app/スカイプ-ステップ/id1375375145?1=ja&ls=1&mt=8

# ■アプリはステップI、I、II、IIすべてダウンロードしなければいけないのか

各アプリはそれぞれ独立しているため、ステップⅠのみ、ステップⅡのみ、ステップⅢのみを ダウンロードして利用することもできる。ただし、検査結果の採点や所見を見るにはステップⅠ のメインメニュー「児童管理」から児童選択をする必要がある。そのため下記の組み合わせでダ ウンロードし、使用する。

- ステップIのみ
- ステップ I 、 Ⅱ
- ステップⅠ、Ⅱ、Ⅲ

# ■アプリにログインできない

①インターネットに接続していない

ログインする際は、IDとパスワードの認証を行うため、インターネットに接続している必要 がある。インターネットに接続した状態でログイン操作を行う。

- ②ID・パスワードが間違っている
  - ID:LD-SKAIP IDを入力する。LD-SKAIP ID はマイページ(LD-SKAIP 利用者管理システム) で確認することができる。(確認方法は操作1p.30、操作抜粋 p.30 参照)
  - パスワード:日本 LD 学会/特別支援教育士資格認定協会マイページで使用しているパスワ ードを入力する。

③パスワードの変更が反映されていない

マイページでパスワードを変更した際は、一度 LD-SKAIP 利用者管理システムにアクセスするこ

と必要である。LD-SKAIP 利用者管理システムにアクセスすることで、日本 LD 学会のマイページ でのパスワード変更が LD-SKAIP システムに反映される。

# ■講習会の受講を申し込み、費用を納入したのにステップⅡ(・Ⅲ)が起動しない・クラウドシステムにログインできない

①参加費納入の情報が反映されていない

講習会申込・参加費納入から仮利用が可能になるまでに5営業日程度かかる。マイページ

(LD-SKAIP 利用者管理システム)でステップⅡ(・Ⅲ)に仮利用期間中の表示がない場合はま だ参加費納入の情報が反映されていないため、ステップⅡ(・Ⅲ)、クラウドシステムを利用す ることができない。情報が反映されたのを確認してから起動する。

②利用権限の変更がアプリに反映されていない(操作1p.15、操作抜粋 p.15)

LD-SKAIP ステップⅡ(・Ⅲ)の講習会を申し込み、参加費を納入するとステップⅠのみの利 用からステップⅡ(・Ⅲ)の仮利用に利用権限が変更になる。参加費納入前の状態でアプリにロ グインしている場合は、利用権限の変更をアプリに反映させる必要がある。インターネットに接 続した状態で、「再認証」をタッチするか、ログインしなおす。

なお、講習会を受講しなかった場合は仮利用期間が終了すると仮利用であったステップは利用 できなくなる。

#### ■クラウドシステムにログインできない

ステップⅡ講習会参加費を納入し、マイページ(LD-SKAIP 利用者管理システム)に反映された後、クラウドシステムにログインすることができる。

ステップ I のみの利用や、ステップ II 講習会参加費納入が反映される前は、ログインすること ができない。

#### ■インターネットには常に接続している必要があるか

LD-SKAIP アプリを利用するのにインターネット接続が必要なのは下記の場合である。

- ・アプリにログインする
- ・検査結果データを同期(受信・送信)する
- ・再認証をする

ステップⅠ、Ⅱ、Ⅲを実施する際にはインターネットに接続している必要はない。

クラウドシステム、LD-SKAIP 利用者管理システムはインターネットブラウザでの利用であり、 インターネット接続が必要である。

■クラウドシステムのログインページが分からない(操作1p.37)

クラウドシステムのログインページ URL は下記である。

クラウドシステムログインページ:https://www.skaip-sens.net/login/index

\*ステップ I のみの利用者はクラウドシステムにログインすることはできない。

■LD-SKAIP 利用者管理システムのログインページが分からない(操作1p.30、操作抜粋p.30) マイページ(LD-SKAIP 利用者管理システム)は日本LD 学会/特別支援教育士資格認定協会の マイページからアクセスできる。下記 URL からマイページにログインし、画面下方の「LD-SKAIP 利用」をクリックする。

マイページログインページ:https://jald-sens.org/entry/login.aspx

#### ■パスワードを忘れてしまった

パスワードは日本LD 学会/特別支援教育士資格認定協会マイページのログインパスワードと 共通である。

パスワードを確認するには、マイページログイン画面に表示されている「ログイン ID・パス ワードをお忘れの方はこちら」をクリックし、メールアドレス、リマインダの質問、リマインダ の回答を入力してパスワードを確認する。

#### ■LD-SKAIP ID を忘れてしまった

マイページ(LD-SKAIP利用者管理システム)にアクセスすると、左側の個人情報欄にLD-SKAIP ID が表示されているのでそこで確認する。

#### ■操作マニュアルをダウンロードしたい

①ステップIのみ利用(フリー利用者)
 下記アドレスにアクセスし操作マニュアルをダウンロードする。
 <a href="https://skaip-sens.net/start/">https://skaip-sens.net/start/</a>

②ステップⅡ・Ⅲ利用登録者

クラウドシステムの「テンプレートダウンロード」-「共通」からダウンロードする。クラウ ドシステムのログインページは <u>https://www.skaip-sens.net/login/index</u>

# ■回答用紙・記録用紙をダウンロードしたい(操作1p.37~39)

ステップⅡおよびステップⅢで使用する回答用紙、記録用紙はクラウドシステムの「テンプレ ートダウンロード」-「ステップⅡ」および「ステップⅢ」からダウンロードする。

# ■これまでとは別の(新しく購入した) iPad で LD-SKAIP のアプリを使いたいがどんな手続 きが必要か

一般社団法人日本 LD 学会/一般財団法人特別支援教育士資格認定協会には特に届けなどの手続きは必要ない。

これまで使っていた iPad で、これまでに実施した検査の採点を済ませ、クラウドシステムに 検査結果を同期(送信)しておく。

使いたい iPad に LD-SKAIP アプリをダウンロードし、LD-SKAIP ID とパスワードでログインす れば利用することができる。これまで登録した児童については、ログインした時点で児童選択画 面(検査)・(結果)に表示される。検査結果は検査ごとにクラウドシステムと同期(受信)する ことで、見ることができるようになる。

# ■LD-SKAIP ステップⅡ講習会、ステップⅢ講習会を受講した者が S. E. N. S の会支部会で伝 達講習会を行ってもよいか

LD-SKAIP 講習会を受講した者が S. E. N. S の会支部会で伝達講習会を行ってもよい。その際、 伝達講習会受講者がアプリを操作することも構わない。

ただし、伝達講習会はLD-SKAIP 講習会の代わりにはならないため、LD-SKAIP を児童に利用するためには、一般財団法人特別支援教育士資格認定協会主催のLD-SKAIP 講習会を受講する必要がある。

## ■ステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢをそれぞれ別の日に行ってもよいか

ステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢを別日に行って構わない。

ステップⅡの3つの検査(読字・書字・計算検査、音韻検査、視覚認知検査)、ステップⅢの 3つの検査(読み検査、書き検査、算数検査)もそれぞれ別日に行って構わない。

ステップⅢ算数では、実施する下位検査領域を選択できるため、下位検査領域ごとに別日に実施することも可能である。その場合、一度検査を実施すると、児童選択画面(検査)で児童が表示されないため、「検索」をタッチし、「実施済みを表示する」にチェックを入れて「検索」することで、児童が表示される。実施する下位検査領域を選択する際に、すでに実施済みの下位検査領域を選択しないように気を付ける。(操作 3p. 55~56 参照)

#### ■検査を中断したい時はどうすればよいか

#### (所見は閲覧しなくてよく、休憩後続きから検査したい)

検査を中断したい場合は、LD-SKAIPの動作が止まっている(「次へ」ボタンをタッチしないと 進まない)画面で、ホームボタンを1回押してホーム画面に切り替えたり、ホームボタンを2回 押して、起動中の他のアプリと切り替えたりすることでデータを消すことなく検査を中断するこ とができる。

検査に戻りたいときは、ホームボタンを2回押し、LD-SKAIPの画面をタッチすることで再開 することができる。この時に誤ってスワイプ(アプリの画面に触れたまま上へ指をスライド)し

て画面から消してしまったり、端末の終了・再起動をしてしまったりするとデータが消えてしま うため注意する。

\*iPadのバージョンによってアプリを終了する操作方法が異なることがあるため、それぞれの利用方法を参照すること。





ホームボタン

■ステップⅡ読字・書字・計算を中断し、そこまでの所見を確認したい時はどうすればよいか

ステップⅡ読字・書字・計算を中断し、そこまでの所見を確認したい場合、中断した課題以降 の課題を検査者が「次へ」をタッチするなどして最後まで進め、検査を終了する必要がある

その後ステップⅡ書字の採点を行い入力をする。ステップⅡ書字を実施していない場合は、採 点画面を開き、「次へ」をタッチして最後まで進み「採点終了」をタッチする。(検査・採点を終 了しないと所見を確認することができないため、終了した状態にする。)

その後、「所見」をタッチして所見を確認する。その際、児童が実施していない部分の所見も 表示されるため注意する。

例:ステップⅡ書字「カタカナ聴写」まで終了して中断したい場合、検査者がボタンをタッチ してステップⅡ書字「視写」、ステップⅡ計算の最後まで進め検査を終了する。採点画面でステ ップⅡ書字「聴写」は児童の回答用紙を見て採点し結果を入力し、ステップⅡ書字「視写」は 「次へ」をタッチしていき「採点終了」をタッチする。その後「所見」をタッチして所見を確認 する。

■ステップII 読字・書字・計算を途中から実施し、実施分の所見を確認したい時はどうすれ ばよいか

ステップII読字・書字・計算を途中から実施し、実施分の所見を確認したい場合、実施したい 課題の直前の課題まで検査者が「次へ」をタッチするなどして進めておき、実施したい課題から 児童に実施する。(これまでに、当該児童でステップII読字・書字・計算を実施している場合 は、新たに児童登録を行い、検査を実施する。同じ識別名で同じ検査を実施すると、データが上 書きされ以前のデータを見ることができなくなってしまう。)

その後ステップⅡ書字の採点を行い入力をする。ステップⅡ書字を実施していない場合は、採 点画面を開き、「次へ」をタッチして最後まで進み「採点終了」をタッチする。(検査・採点を終 了しないと所見を確認することができないため、終了した状態にする。)

その後、「所見」をタッチして所見を確認する。その際、児童が実施していない部分の所見も 表示されるため注意する。

例:ステップⅡ書字「視写」から実施したい場合、検査者がボタンをタッチしてステップⅡ書 字「ひらがな・カタカナ聴写」課題まで進めておく。児童にステップⅡ書字「視写」から最後ま で実施し検査を終了する。採点画面でステップⅡ書字「聴写」は「次へ」をタッチしていき、

「視写」は児童の回答用紙を見て採点し結果を入力する。その後「所見」をタッチして所見を確認する。

#### ■検査実施後すぐに採点・同期しないといけないのか

#### ■検査実施後すぐ別の検査を実施したり、別の児童に検査を実施してもいいのか

検査実施後にすぐ採点・同期をする必要はない。検査後、すぐに別の検査を実施したり、別の 児童に検査を実施したりして構わない。

検査データは自動で保存されているため、後日に採点、所見の確認、同期をすることができる。その場合はLD-SKAIP アプリからはログアウトはしないこと。(アプリを終了するだけではロ グアウトすることにはならない。詳しくは「<u>アプリを終了するとログアウトしてしまうのか</u>」 を参照)

### ■アプリを終了するとログアウトしてしまうのか

アプリを終了(操作1p.13)してもログアウトはしない。また、時間の経過により自動でログ アウトすることもない。

メインメニューまたはステップⅡ・Ⅲスタート画面の「ログアウト」をタッチした場合にのみ ログアウトできる。(操作1p.29)

### ■ログアウトは必ずしないといけないのか/ログインしたままでもよいか

ログアウトはしなくても構わない(ログインしたままでもよい)。ただし、共用の iPad であったり、児童や他の人が iPad を利用したりするような場合には、情報の流出防止ため必要に応じてログアウトする。

ログアウトすると、下記のデータが削除され、確認できなくなるため注意する。

【ログアウトにより削除されるデータ】

・同期していない検査結果データ

(練習用に設定されている検査結果データ・未採点の検査結果データを含む)

ステップⅡ音韻検査の音声データ

・ステップⅢ読み検査の音声データ

#### ■ヘッドフォンから音が聞こえない

ヘッドフォンから音が聞こえないと児童が訴える場合、次の点を確認する。
①プラグがイヤホンジャックの奥まで差し込まれているか確認。
②音が聞こえる画面であることを確認。(プラグを抜いてみて音が聞こえるか確認。)
③音が聞こえるか検査者がヘッドフォンを付けて確認。

→聞こえない: ヘッドフォンを交換する。

→聞こえる:児童にとっては聞きにくいという場合は児童に合わせて音量の設定をしなおす。

#### ■ヘッドフォンをつけるのを嫌がる

ステップII読字・書字・計算では、ヘッドフォンを着けることが推奨される。これは①音声を 聞き取りやすくするため、②周囲の雑音を減らして児童が集中しやすいようにするためである。 しかし、感覚過敏などのために着けるとかえって検査に集中しづらい場合は着けずに検査をして もよい。

ステップII補助検査:音韻では、児童の回答を録音するためにマイク付きヘッドフォンを利用 する。しかし、ヘッドフォンを着けることが難しい場合は、iPad 本体のマイク機能で録音する。 児童にははっきり大きな声で回答するように指示する。

### ■ステップⅢ算数で画面のメモに文字を書くのが難しい(操作3p.45、p.55)

ステップⅢ算数のメモ機能はタッチペンを使って書くことを想定している。タッチペンの利用 が難しい場合は、別途ホワイトボードとホワイトボード用マーカーや計算用紙と鉛筆などを準備 し、使用する。

#### ■iPad の電源が途中で切れてしまった・アプリが途中で落ちてしまった

iPad の電源が切れてしまったり、アプリが途中で落ちてしまったり場合、それぞれの検査は 下記のように検査データが保存されるようになっている。保存されているデータの次から検査を 再開する。

【ステップI】

1つ前のページまでの回答が保存されている。児童選択画面(検査)では実施状況が「未実施」と表示されるため、「実施する」をタッチして質問画面まで進み、続きから回答を行う。

【ステップⅡ】

最後の問題まで終了している課題について検査データが保存されている。児童選択画面(検 査)では実施状況に「○○から」とどの課題から再開するか示されるため、「実施する」をタッ チして続きの問題に取り組む

例:ステップⅡ読み「文の読み」の途中で電源が落ちた→ひとつ前のステップⅡ読み「無意味 語選択」までの回答が保存されている。「児童選択画面(検査)」の実施状況には「文の読みか ら」と表示される。「実施する」をタッチして、続きの問題に取り組む

【ステップⅢ読み・書き】

検査が終了していないとデータは保存されない。児童選択画面(検査)では実施状況が「未実施」と表示されるため、「実施する」をタッチして検査を実施する。

【ステップⅢ算数】

1つ前の画面までの回答が保存されている。下位領域の区切りではなかった場合、上限下限が 確定していない下位領域が存在することになる(検査者が操作して中断した場合は、下位領域の 区切りの問題までしか保存されない)。【習得状況プロフィール】では正答率が「実施した設問の うち正答した設問数/全設問数(実施した設問数ではなく、その下位領域に含まれている全ての 設問数)」と計算されて表示されるので注意する。

続きを実施する場合は、以下のように進める。

①途中で中断された下位領域のうち、すでに回答した問題について、実施中に検査者が記録用 紙に取ったメモやステップⅢ算数の【習得状況プロフィール】【回答表示画面】で児童の回答を 確認しておく。

②「児童選択画面(検査)」で該当する児童を選択する。一度ステップⅢ算数を実施した児童 は実施終了者となり表示されないため、「検索」をタッチし、「実施済みを表示する」にチェック を入れて「検索」する(→操作3p.55~56参照)。

③途中で中断された下位領域を含み実施したい下位領域を選択し、検査を開始する。すでに児 童が実施済みの問題は検査者が回答を入力し、続きから児童に回答させる。

#### ■アプリが固まってしまった

アプリが固まってしまった(画面をタッチしても動かない、音声が流れない)場合は、アプリ を一度完全に終了する。

終了するには、ホーム画面に戻り(iPad のホームボタンを押す)、iPad のホームボタンを素早 く2回押して、起動中のアプリを表示させる。終了したいアプリを上方向へフリック(アプリの 画面に触れたまま上へ指をスライド)し、画面上から消す。(操作1p.12~13)

これ以降は Q&A「iPad の電源が途中で切れてしまった・アプリが途中で落ちてしまった」の項目を参照。

#### ■同じ児童に再度検査を実施したい(操作1p.21、操作抜粋p.21)

現在のバージョン(2019年1月)では、同じ児童(識別名)に複数回実施することに対応し ていない。同じ検査を同じ児童に複数回実施する場合、別の識別名で新しく児童登録を行う必要 がある。同じ識別名で同じ検査を取った場合、後で行った検査のデータのみが残ることになる。 古いデータは削除される。

次のバージョンでは、同じ児童(識別名)に複数回実施可能になる予定である。

#### ■どれくらいあけたら同じ検査を再度検査してよいか

ステップIについては、特に期間の定めはない。

ステップⅡ・Ⅲについては1年程度の期間をあけることが目安となる。特にステップⅢ読みに ついては、話の内容を覚えてしまっていると学習効果がでる可能性が高いため、十分な期間をあ けることが必要である。

#### ■年度が変わったが同じ識別名で検査してよいか(操作1p.17、操作抜粋p.17)

年度が変わってから検査を行う際には新しい学年で児童の登録を行う。

例えば 2018 年度に3年生の児童にステップ I・IIを実施し、2019 年度(4年生)に入ってから ステップIIIを検査するとステップIIIの検査は3年生用の課題で出題され、評価も3年生の基準値 で行われてしまう。このため、2019 年度に入ってから検査をする場合には、4年生として新たに 児童登録を行い、ステップIIIを実施する必要がある。この場合、ステップ I・IIと連動した所見 は出力されない。

# ■年度が変わったが、ステップIは新しい担任につけてもらった方がよいか、前の担任につけてもらった方がよいか

ステップIは児童のことをよく知っている教師につけてもらう方がよい。そのため、年度が変わってすぐの時期は1つ前の学年の担任につけてもらった方がより信頼性のある結果になると考えられる。

#### ■検査を実施したのに、所見が見られない(所見ボタンがアクティブにならない)

ステップⅡ読字・書字・計算、ステップⅡ補助検査:音韻、ステップⅢ読み、ステップⅢ書き は検査後、採点を終了しないと所見を見ることができないため、採点を行う。

ステップⅡ読字・書字・計算→操作2p.22

ステップⅡ補助検査:音韻→操作2p.46

ステップⅢ読み→操作3p.18

ステップⅢ書き→操作 3 p. 33

## ■音声データ(ステップⅡ補助検査:音韻、ステップⅢ読み)を聞くことができない

音声データはクラウドシステムへの同期対象外である。そのため、アプリからログアウトする と音声データは削除され、ログイン後も聞くことはできない。

ステップⅡ音韻、ステップⅢ読みは検査を実施したらできるだけ早く採点を終了させ、クラウ ドシステムに結果を同期するようにする。

#### ■採点をしたのに「採点」のボタンが表示されたままになる

「採点」のボタンは採点の修正ができるように、採点が終了しても表示されたままである。 ステップⅡ書字、ステップⅡ音韻、ステップⅢ読みは一度採点が終了した後、再度「採点」を タッチすると、採点済みのデータが表示されるため、該当部分のみ修正する。

ステップⅢ書きは一度採点が終了した後に、採点を修正する場合には採点済みのデータは表示 されず、再度作文をカメラで撮影する最初の段階からスタートとなる。

#### ■クラウドシステムに結果データを同期(送信・受信)できない

#### ■クラウドシステムで検査結果の閲覧・ダウンロードができない

①結果データを同期(受信・送信)するのにインターネットに接続していない

検査データを同期する際は、インターネットに接続している必要がある。インターネットに接 続した状態でデータの同期を行う。

②講習会受講の情報が反映されていない

ステップⅡ(・Ⅲ)の講習会受講後から結果データの送信や、検査結果の閲覧が可能になる。 なお、講習会受講から本利用が可能になるまでに5営業日程度かかる。マイページ(LD-SKAIP 利用者管理システム)でステップⅡ(・Ⅲ)の講習会の状況が受講済になっていない場合はまだ 講習会受講の情報が反映されていないため、クラウドシステムへの結果データ送信や結果の閲 覧・ダウンロード機能を利用することができない。情報が反映されたのを確認してから利用す る。

#### ③利用権限の変更がアプリに反映されていない(操作1p.15)

LD-SKAIP ステップⅡ(・Ⅲ) は講習会を受講すると仮利用から本利用に利用権限が変更にな

る。仮利用の状態でアプリにログインしている場合は、利用権限の変更をアプリに反映させる必要がある。インターネットに接続した状態で、「再認証」をタッチするか、ログインしなおすことで変更を反映する。

 ④日本LD 学会/特別支援教育士資格認定協会のマイページでパスワードを変更した LD-SKAIP アプリにログインした状態で、パスワードを変更した場合
 手順1:LD-SKAIP 利用者管理システムにアクセスする(操作1p.30)
 手順2:アプリのメインメニューでパスワードの変更を行う(操作1p.14)
 手順3:データの同期(送信・受信)を行う(操作1p.24)

#### ■結果を印刷したい

①検査データをクラウドシステムに同期(送信)する(操作1p.24)
 ②クラウドシステムにアクセスする(操作1p.37)
 ③該当児童の「所見 PDF」をダウンロードし印刷する(操作1p.39)

# ■結果を保護者に説明する際、結果データをそのままお渡ししてもよいか

保護者へ検査結果のデータのみをお渡しすることはせず、必ず報告書を作成してお渡しする。

## ■クラウドシステムでステップⅢ算数の回答内容が表示されない

ステップⅢ算数の回答内容は、アプリからクラウドシステムに同期されてはいるが、クラウド システムで表示はされない。回答内容を確認したい場合は、LD-SKAIPのアプリで確認する。

# ■検査データを同期したのに、「結果受信」のボタンが表示されない

「結果受信」はアプリから一旦ログアウトし、再度ログインした場合に表示される。「結果受 信」を行うと「結果受信」は灰色になり、アクティブでなくなる。

### ■iOS のバージョンはどこで確認するのか

iPad のソフトウェア(iOS)のバージョンを確認するには、下記のような手順をとる。 1. iPad ホーム画面にある「設定」をタップする。



2. 「一般」→「情報」の順にタップする。

Pad 🕈	15:17	<b>1 \$</b> 95% <b>■</b> )
設定	一般	
▶ 機内モード	情報	>
🛜 Wi-Fi meisei-wpa2	(フトウェア・アップデート	>
💦 Bluetooth オン	<b>[</b>	
	AirDrop	
🕒 通知	Handoff	$\rightarrow$
🔁 コントロールセンター	マルチタスクとDock	>
おやすみモード		
	アクセシビリティ	
<mark>⊘</mark> −₩		
🗚 画面表示と明るさ	iPadストレージ	>
(後) 壁紙	Appのバックグラウンド更新	>

3. 「バージョン」の横に記載された数字が、iOSのバージョンである。

iPad 🕈		15:17	* 95% 💻		
	RE	<一般	情報	使用可能	110.83 GB
2	WHT-F	名前	iPad >		
?	Wi-Fi meisei-wpa2			15 - 25 - 24	44 4 4 4 5 0 7 7)
*	Bluetooth オン	曲	0	ハーション	11.4.1 15G/7)
		ビデオ	8		
	通知	写真	27	モデル	MGTY2 I/A
2	コントロールセンター	App	14	C770	10101120/2
C	おやすみモード	容量	128 GB	7	
		使用可能	110.83 GB		
	一般	15-21-24	11 4 1 (15077)		
AA	画面表示と明るさ	7-939	11.4.1 (15077)		
	PANT	モデル	MGTY2J/A		
189	328.82C	とロフル委員	DMDD21W0JO5W2		

# ■iOSのアップデートとは何か

iOS(オペレーティングシステム)は iPad 等を動かすために使われる基本的なソフトであり Apple 社が開発をしている。より新たな機能の追加やバグ(プログラム中の誤り)の修正を行い 公開される(アップデート)。iPad がインターネットに接続されていれば iOS のアップデートを 反映させるか画面表示される。

iOSのバージョンは iPadの「設定」から確認でき、「11.4.1」のように表示される。

年に1回程度 iOS11 から iOS12 のように最初の数字が変わるような大きなアップデートが行われる。この際、新しい iOS に対応できずアプリが使えなくなることがある。

# ■LD-SKAIP アプリのバージョンアップはしないといけないのか

iOS のアップデートに対応できるように LD-SKAIP アプリもアップデートを行う。iOS のアップ デートは対応できるアプリのバージョンアップが行われてから反映させるようにする。

アプリのバージョンアップはメールやマイページ(LD-SKAIP 利用者管理システム)のお知ら せで案内する。